

# Verbrennungen und Verbrühungen.

Für die Erstversorgung.



Feuer, heiße Gegenstände, heiße Gase, elektrischer Strom, Chemikalien und übermäßige Sonnenbestrahlung können Haut und darunterliegendes Gewebe verbrennen. Von Verbrühungen spricht man bei Schädigungen durch heißen Dampf und siedende Flüssigkeiten. Die Schwere der Verbrennungen und Verbrühungen werden aufgrund folgender Punkte beurteilt:

- 1. Grad** Die Haut ist gerötet
- 2. Grad** Rötung und Blasenbildung, eventuell oberflächliche Verschörfung
- 3. Grad** Tiefe Zerstörung der Haut und Unterhaut mit Verschörfung oder Verkohlung



## Erste Massnahmen bei Verbrennungen:

- Hitzezufuhr sofort unterbrechen.
- Verbrannte Bereiche sofort mit kaltem Wasser oder besser mit **VESTA** Hydrogel während mindestens 20 bis 30 Min. kühlen um weitere Hitzeentwicklung, Schwellungen und Wasserverlust zu vermindern und Schmerz zu lindern.
- **WICHTIG:** Über das Tiefergreifen der Verbrennung entscheiden oft Sekunden!
- Wunde mit sterilem Deckverband oder sauberen Tüchern bedecken.



## Besondere Regeln:

- Kleider nicht entfernen
- Blasen nicht aufstechen
- Keine «Hausmittel» wie Öl, Salben, Butter etc. verwenden

## Wichtig

Verbrennungen des 2. und 3. Grades sowie leichtere Verbrennungen im Gesicht, an den Händen, über den Gelenken und an Geschlechtsstellen müssen vom Arzt begutachtet und behandelt werden.

## Achtung

Bei Kindern sind im Gegensatz zu Erwachsenen bereits geringere Verbrennungen gefährlich.



**VESTA** ist ein natürliches Produkt, bestehend aus Wasser und Geliermittel. Je nach Ausmass einer Verletzung wird **VESTA** in unterschiedlicher Form als reines Hydrogel oder als in Hydrogel getränkter Wundverband angewendet.

**VESTA** besitzt die erstaunliche Fähigkeit, physikalisch Hitze höchst wirkungsvoll zu absorbieren und verschafft dadurch Erleichterung.

**VESTA** kühlt den verletzten Bereich augenblicklich und hält diesen dauerhaft kühl. Dadurch wird bei sofortiger Anwendung der Verbrennungsprozess gestoppt und das Ausmass an Haut- und Gewebeschäden reduziert. Das Hydrogel schützt einerseits vor Verunreinigungen von aussen und somit vor Infektionen, andererseits wird der Verlust an Körperflüssigkeit verhindert.

**VESTA** ist weder hautreizend, noch fettend und klebt nicht auf der Verletzung, so dass diese vom Arzt ohne schmerzende Reinigung behandelt werden kann.

## Anwendung:

**VESTA** ist einfach in der Anwendung. Im Falle einer Verbrennung wird der **VESTA**-Wundverband auf die Brandwunde gelegt oder das reine Hydrogel dick auf die verletzte Stelle aufgetragen.



Weitere Infos: [www.vestatec.ch](http://www.vestatec.ch)

Erste Hilfe  
bei Verbrennungen.



INGRAFIK | M-INFOFANGER | STANSSTAD



## VESTA Produkte

**VESTAGEL:** Steriles Hydrogel, erhältlich in Sticks. Eignet sich zum Mitnehmen an den Arbeitsplatz, wie z.B. in Küchen und Industriebetrieben.



**VESTASAN:** In Hydrogel getränkter steriler Wundverband. Als Träger dient Schaumstoff.




**VESTASAN** ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist das ideale Produkt für die Hausapotheke.

**VESTASOL:** Hydrogel mit zusätzlichen hautpflegenden Komponenten in praktischen Tuben. VESTASOL wirkt wohltuend und lindert bei Sonnenbrand.



**VESTASOL** kühlt und lindert auch wirksam bei Insektenstichen und Quallennesseln!

Ihr VESTA Fachhändler:

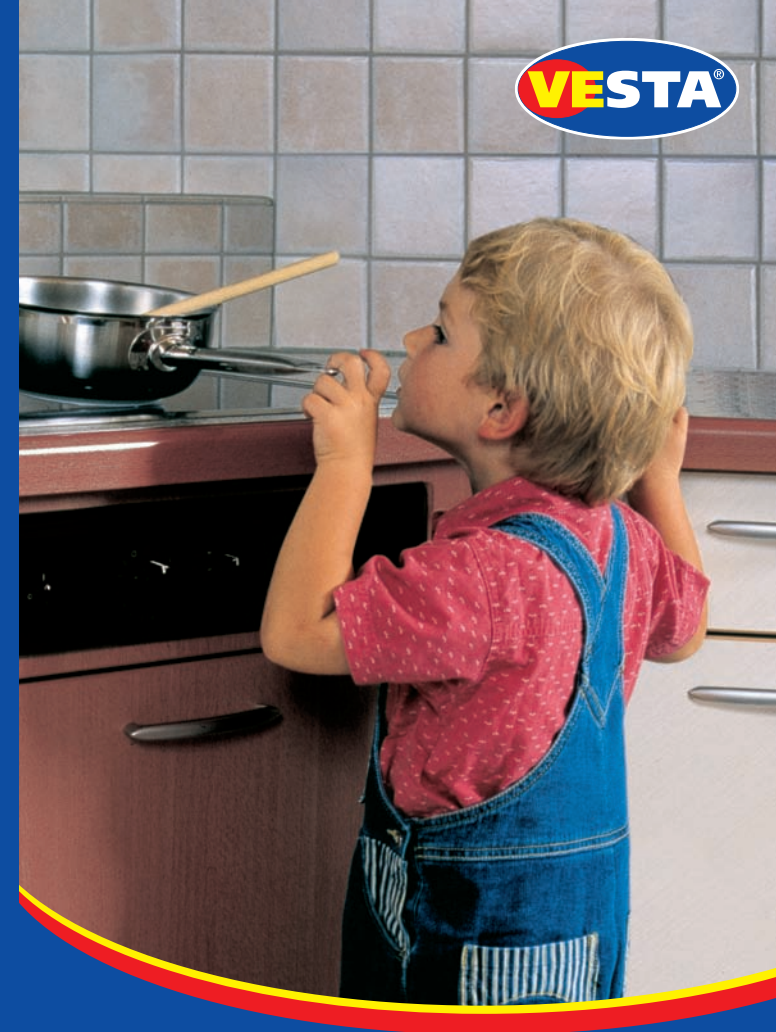

Verbrennungen  
passieren immer und überall.